



Panneau de commandes

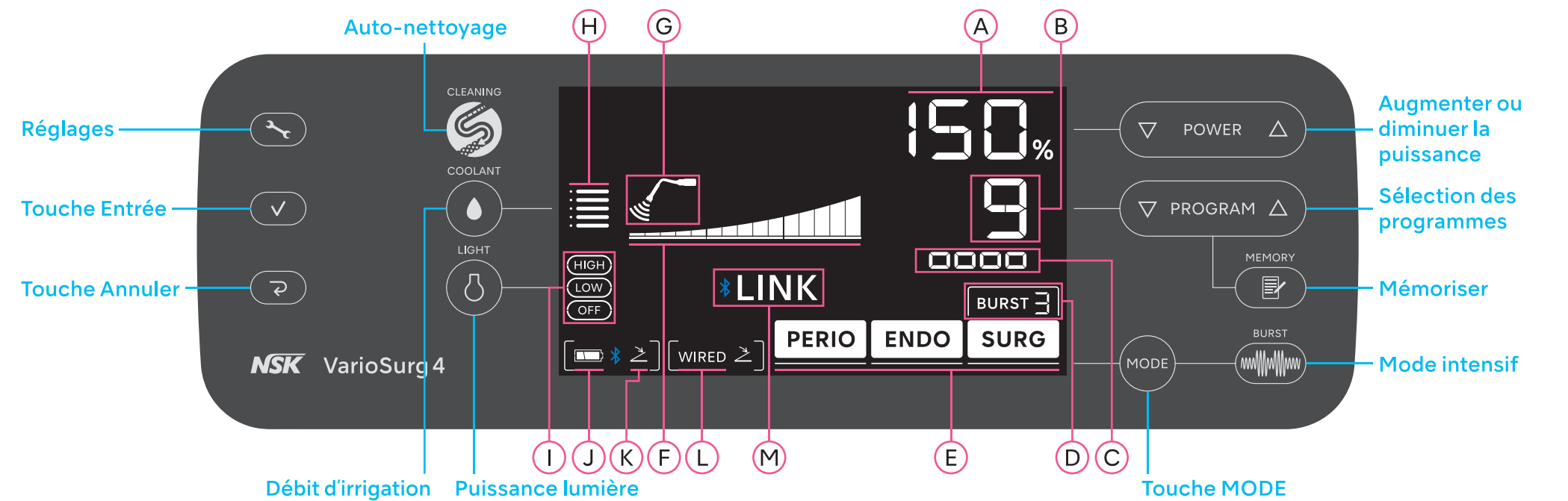


Pédale de commande

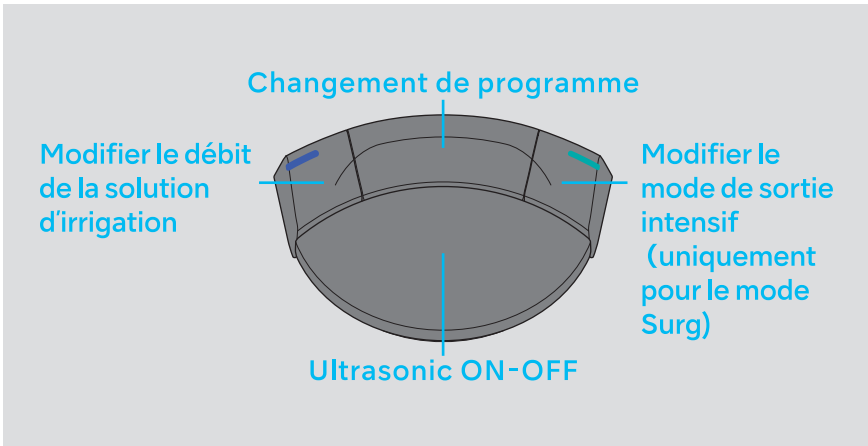


A	Niveau de puissance	I	Niveau de lumière
B	Numéro du programme en cours	J	Niveau de batterie de la pédale sans fil
C	État de la réussite de l'étalonnage de la pédale sans fil	K	État de la connexion avec la pédale sans fil
D	Niveau du mode intensif	L	État de la connexion avec la pédale filaire
E	Mode	M	État de la connexion avec le Surgic Pro2
F	Le niveau de puissance est indiqué par le nombre de barres affichées		
G	Vibration		
H	Niveau de débit de la solution d'irrigation		

Préparation à l'utilisation

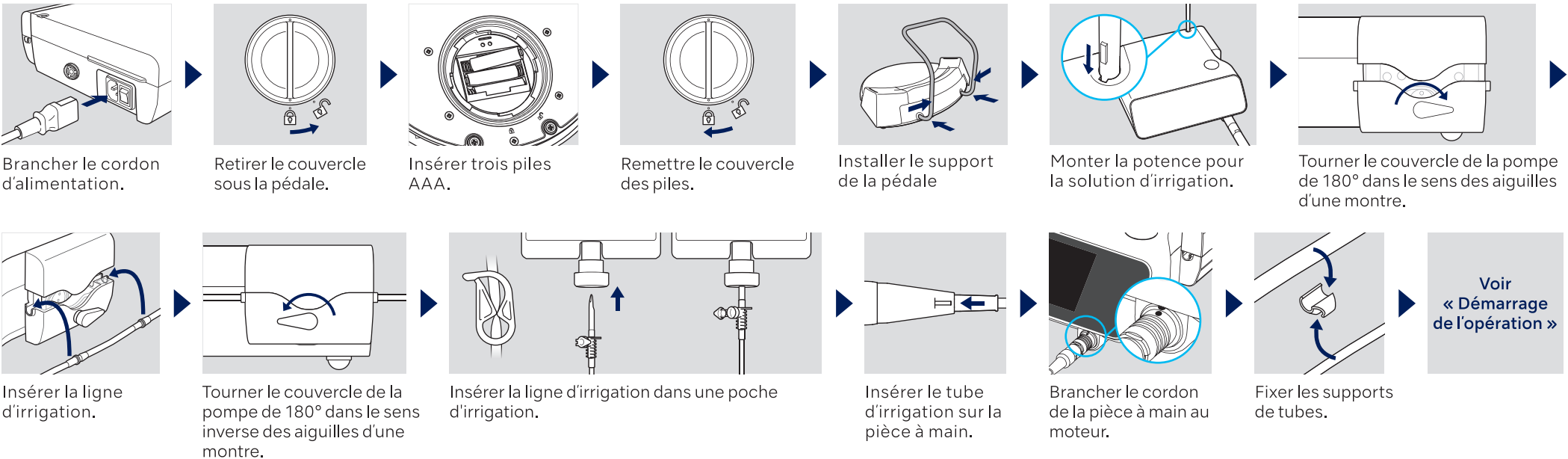

Démarrage de l'opération

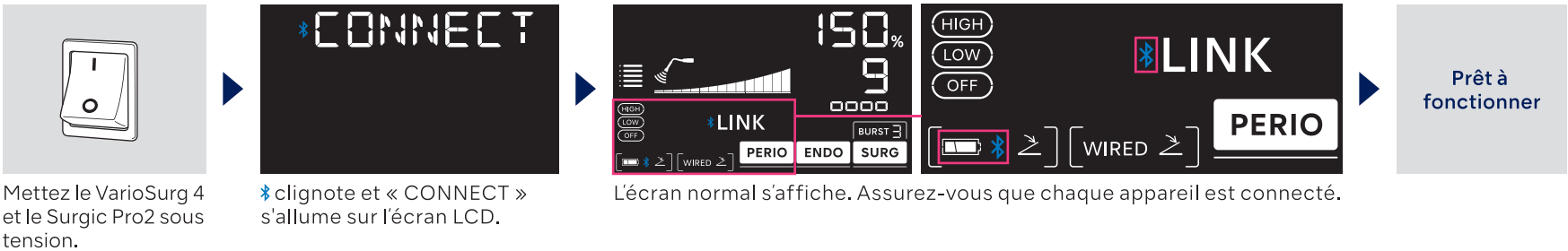

Lien avec Surgic Pro2

Étape 1. VarioSurg 4




Étape 2. Surgic Pro2




Étape 3. VarioSurg 4 / Surgic Pro2

VarioSurg 4

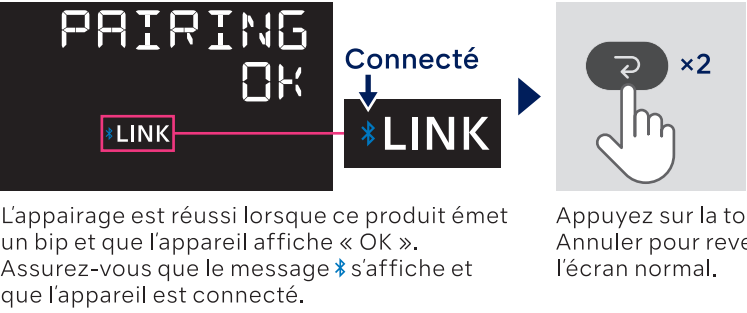

Surgic Pro2

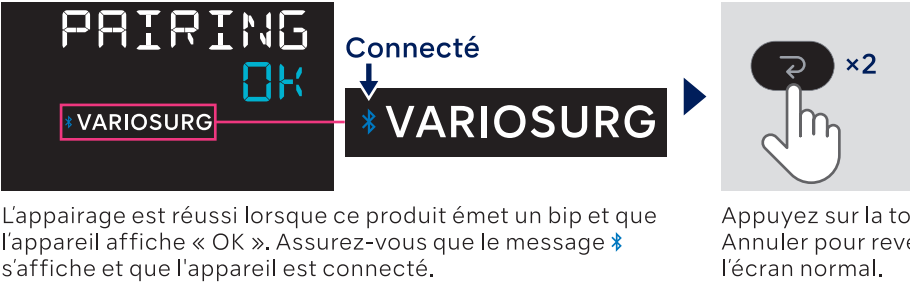

VarioSurg Tips MODE & POWER GUIDE

Model	Mode	Max	Model	Mode	Max	Model	Mode	Max	Model	Mode	Max
H-SG1	S	150%	SG8A	S	80%	SG15D	S	50%	SCL5D	S	80%
H-SG8	S	150%	SG9	S	50%	SG16A	S	50%	E30RD-S	E	50%
H-SG8R	S	150%	SG10	S	50%	SG16B	S	50%	E30LD-S	E	50%
H-SG8L	S	150%	SG11	S	50%	SG68	S	80%	E31D-S	E	50%
SG58	S	80%	SG12	S	100%	M-RE2	S	80%	E32D-S	E	50%
SG1	S	80%	SG14R	S	80%	M-ST1	S	80%	G1-S	S	50%
SG1A	S	80%	SG14L	S	80%	M-OC1L	S	80%	P20-S	P	100%
SG2R	S	80%	SG17	S	80%	M-OC1R	S	80%	P25R-S	P	100%
SG2L	S	80%	SG18R	S	50%	SCL1	S	50%	P25L-S	P	100%
SG3	S	80%	SG18L	S	50%	SCL1D	S	80%	V-P10	P	100%
SG4	S	80%	SG19	S	80%	SCL2D	S	80%	V-P11R	P	100% *
SG5	S	80%	SG30	S	50%	SCL3	S	50%	V-P11L	P	100% *
SG6D	S	80%	SG15A	S	50%	SCL3D	S	80%	V-P12	P	100% *
SG7D	S	50%	SG15B	S	50%	SCL4D	S	80%			
SG8	S	80%	SG15C	S	50%	SCL5	S	50%			

* Attention : à utiliser uniquement avec VarioSurg 3 et VarioSurg4