

Varios Combi Pro2



NSK



32

raisons de choisir le Varios Combi Pro2

Après avoir écouté les besoins d'un large éventail de professionnels dentaires, nous avons conçu un appareil combiné qui offre les fonctionnalités avancées que les praticiens attendent réellement.

Alliant l'aéropolissage par poudre sous-gingivale et supra-gingivale au détartrage ultrasonique complet, le Varios Combi Pro2 a été pensé pour une utilisation facile, s'adaptant à votre style de traitement préféré.

Né de l'expérience et de la recherche approfondies de NSK, le Varios Combi Pro2 vous apporte le soin professionnel que vous attendez. Sa durabilité et son entretien simplifié en font l'appareil idéal au quotidien, vous permettant d'effectuer vos soins sans interruption, de manière fluide et efficace.

Avec NSK à vos côtés, vous disposez du matériel nécessaire pour assurer un traitement fluide et efficace, de la prévention à la thérapie, pour chaque patient, et à chaque fois.

DÉTARTREUR ULTRASONIQUE

Réservoir d'eau facile à enlever

Le réservoir d'eau est simple à détacher et à remettre en place.

Pièce à main ultrasonique en titane

Fabriquée en **titane pur**, avec finition **DURAGRIP** pour une excellente prise en main et une LED pour une meilleure visibilité.

Réglage du débit d'eau

Contrôle précis et intuitif grâce à une molette analogique.

Chaque molette correspond aux fonctions détartréur ultrasonique et aéropolissage.

Système de chauffage de l'eau

L'eau pulvérisée est chauffée pour plus de confort pour le patient.

AÉROPOLISSAGE PAR POUDRE

Unité et chambres indépendantes

Notre module de traitement par poudre est conçu de manière unique, séparé de l'unité principale. Robuste et facile à entretenir, il garantit un flux de travail fluide en continu dans votre pratique quotidienne.

Buse Jet pour la pièce à main Perio

Pour un traitement encore plus précis, aussi bien sous-gingival que supra-gingival.

Pièce à main poudre avec buse fine

La buse fine de la pièce à main permet un accès facilité aux zones difficiles d'accès.

Écran tactile et intuitif

Affiche uniquement les informations utiles pour chaque procédure, pour un traitement ciblé et une manipulation simple.

SIMPLIFIER L'UTILISATION

DÉTARTREUR ULTRASONIQUE

Détartreur ultrasonique


Conçu pour durer. Agréable à utiliser.

Chez NSK, nous ne faisons aucun compromis sur la qualité. Notre pièce à main de détartrage à ultrasons offre un grand confort à l'utilisation, une durabilité, une praticité, une accessibilité et une visibilité optimales.

Notre Varios Combi Pro2 est équipé d'une pièce à main de détartrage à ultrasons, fabriquée en titane pur, une première mondiale. Elle est résistante à la chaleur et aux produits chimiques, supporte de multiples nettoyages et stérilisations en autoclave.

De plus, pour garantir une excellente prise en main et une stabilité optimale, notre pièce à main est dotée du très réputé **DURAGRIP**, utilisé dans la gamme de rotatifs haut de gamme NSK.

Ce détartréur élégant, fiable, bien équilibré et léger est confortable à utiliser et offre des performances durables.

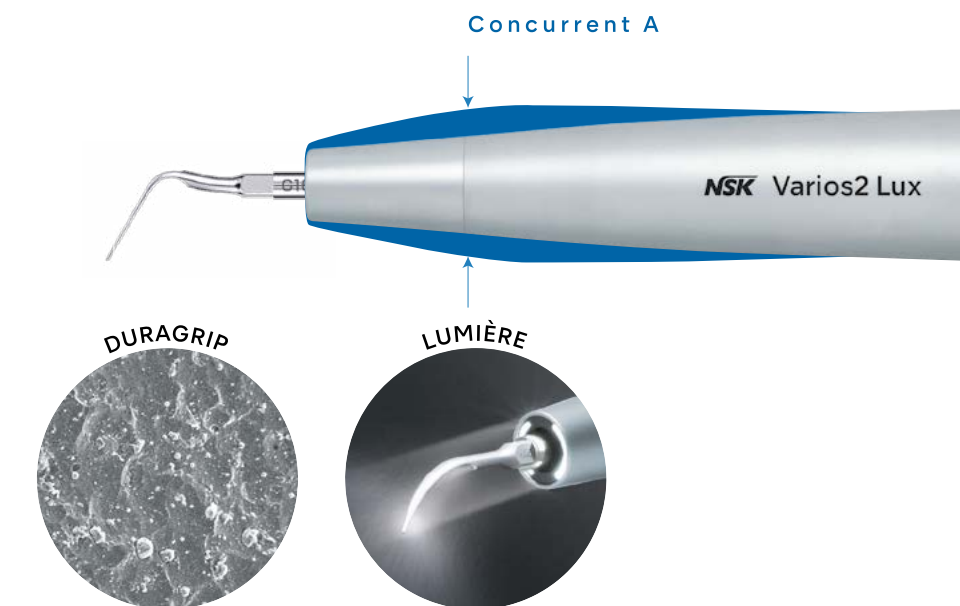


AÉROPOLISSAGE PAR POUDRE

Aéropolissage par poudre

Buses fines interchangeables.


Nos pièces à main et buses sont conçues pour rendre votre travail plus facile et plus efficace :

- L'accès à la région molaire est facilité grâce aux buses longues et étroites.
- Vous bénéficiez d'une excellente visibilité et d'une excellente maniabilité dans la cavité buccale.
- Un large champ opératoire est assuré sur la face linguale sans ouvrir la bouche plus que nécessaire sur la face buccale.
- Les buses sont entièrement remplaçables directement au fauteuil, ce qui simplifie l'entretien et les réparations.

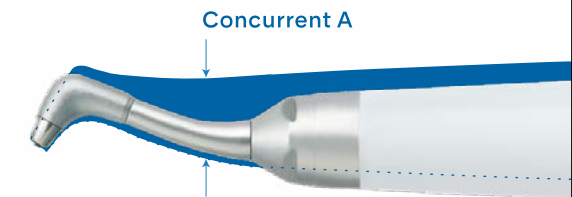

Buse à jet pour pièce à main péri°

Pour répondre à la demande des praticiens, nous avons développé une buse à jet pour la pièce à main péri°, mais qui peut être destinée aux traitements supragingivaux. En complément de la buse précédente, cette buse permet également de cibler plus précisément une zone spécifique. Ces buses parodontales sont interchangeables selon l'application souhaitée.

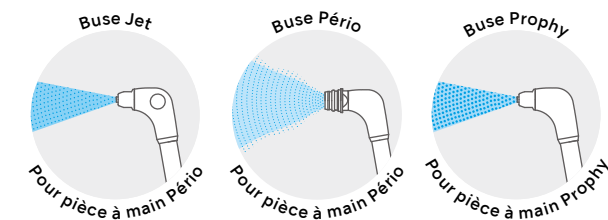


Autonomie et sérénité garanties



Chambres et unités indépendantes

Avec le Varios Combi Pro2, toutes les lignes liées à la poudre (chambre, cordon et pièces à main) sont séparées de l'unité principale. En cas d'obstruction avec la poudre, les pièces peuvent être facilement démontées à la main.

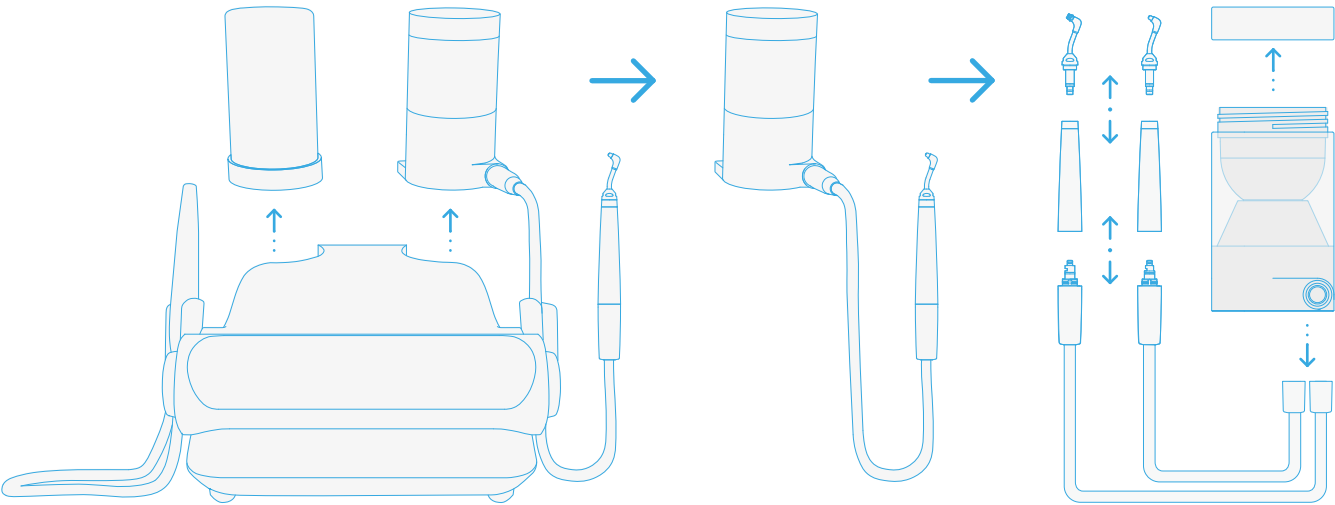

La conception de l'unité principale est ingénieuse : elle est équipée uniquement de circuits d'air et d'eau.



Moins de maintenance de routine requise

Le Varios Combi Pro2 est conçu pour un entretien et une maintenance minimales. Les périodes d'arrêt liées à la maintenance sont donc réduites au minimum.

Entretien facile

Auto-nettoyage



Le Varios Combi Pro2 dispose de quatre modes de nettoyage automatique qui peuvent être activés après chaque séance ou en fin de journée (selon les besoins).

Ces modes évitent l'utilisation d'une multitude d'outils et réduisent le risque d'obstruction par la poudre et d'accumulation d'eau. Ils permettent également de maintenir l'intérieur de l'appareil propre en permanence.



Auto-nettoyage Poudre



Auto-nettoyage Poudre (circuit eau)



Auto-nettoyage Détartreur Ultrasonique



Auto-nettoyage Double Nettoyage



Mode CLM



Le nettoyage du circuit d'eau à l'intérieur de l'appareil est simple grâce à notre solution b.clean et au mode CLM, ce qui rend le Varios Combi Pro2 conforme aux exigences européennes de retraitement.

Pour une sécurité supplémentaire, l'appareil est configuré pour désactiver l'utilisation normale jusqu'à ce que la solution chimique soit entièrement vidangée.

Confort du patient

Système de chauffage de l'eau




Le Varios Combi Pro2 est équipé d'un circuit d'eau chauffant pour le détartreur ultrasonique et les pièces à main d'aéropolissage. La température de l'eau pulvérisée étant quasiment identique à celle de la cavité buccale, le confort est assuré pour un large éventail de patients, même sensibles.

Ergonomie et mobilité

Pédale sans fil multi-fonctions

Positionnez la pédale de commande à l'endroit le plus adapté à vos besoins, sans vous soucier des cordons ou longueurs de câble.

La pédale de commande Varios Combi Pro2 se connecte via Bluetooth® et permet une utilisation simple et pratique grâce à ses options de commande multifonctions, vous permettant ainsi de vous concentrer pleinement sur votre traitement.

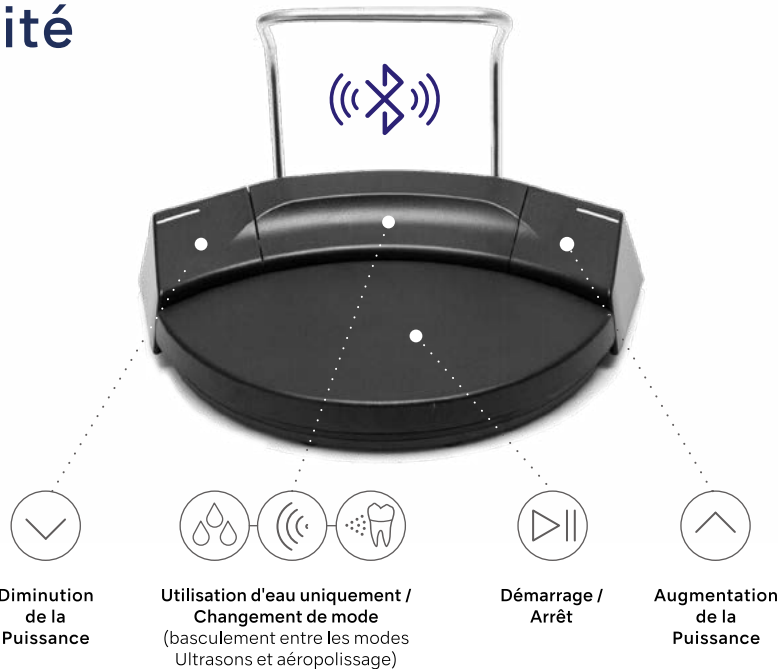

iCart Prophy2 avec kit bouteille d'eau*

Notre cart apporte un nouveau confort et une vraie simplicité à l'utilisation.


Il est équipé d'un système d'alimentation en eau indépendant ; ainsi, en combinant le Varios Combi Pro2 avec l'iCart Prophy2, vous pouvez traiter les patients dans des environnements où la disponibilité ou la qualité de l'eau externe est un problème.



*l'iCart existe également en noir

Gamme d'inserts pour détarteurs ultrasoniques

Plus de 70 inserts disponibles permettant de s'adapter à un large éventail d'applications cliniques, notamment les soins préventifs et le traitement des affections dentaires.

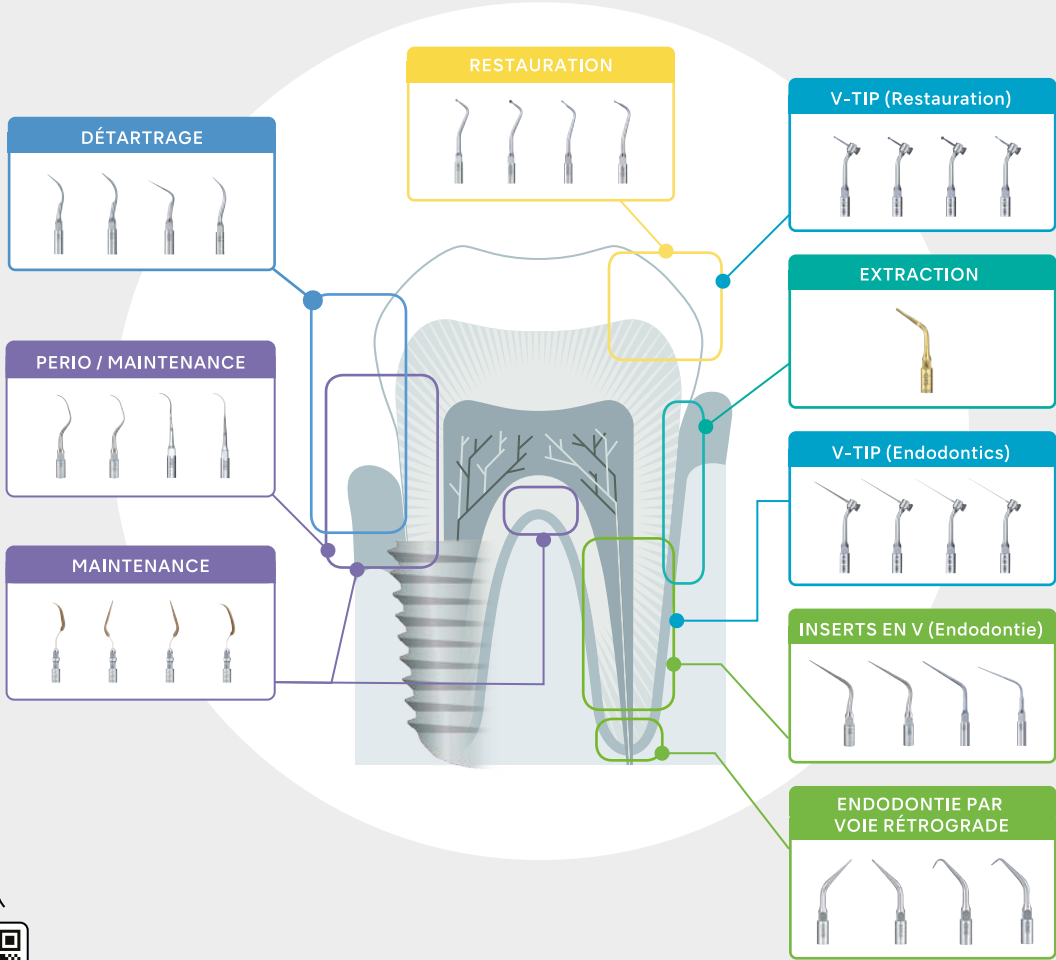

Scanner pour télécharger le guide d'inserts

Lien : https://www.france.nsk-dental.com/admin/wp-content/uploads/PR-D1052FRv2_220325.pdf

POUDRES



POUDRES

Pour des sourires sains et éclatants

L'aéropolissage par poudre élimine efficacement les tâches sous-gingivales et supra-gingivales ainsi que le biofilm. En tirant parti des avantages et des protocoles Varios Combi Pro2, vous entrez dans une nouvelle ère de soins professionnels offrant des résultats exceptionnels. Sans souci pour vous et rassurant pour vos patients.

FLASH pearl

Poudre de polissage pour une utilisation supragingivale, à base de particules sphériques douces pour la surface dentaire.

Utilisation recommandée :
Elimination des tâches tenaces

- Ingrédient principal : Carbonate de calcium
- Sans chlorure de sodium (aucun goût salé)
 - Convient aux patients suivant un régime pauvre en sodium



Taille moyenne des particules :
54µm



MODÈLE	RÉFÉRENCE
FLASH Pearl 300g bouteille x 4	Y900698

SOFT pearl

Poudre de polissage pour une utilisation supragingivale avec une abrasivité minimale. Peut être utilisée même en présence de certains dispositifs prothétiques.

Utilisation recommandée :
Elimination du biofilm et des tâches modérées

- Ingrédient principal : Glycine
- Sans arôme
 - Goût légèrement sucré



Taille moyenne des particules :
65µm




MODÈLE	RÉFÉRENCE
SOFT Pearl 250g bouteille x 4	Y1500721

Poudre Perio Mate

Poudre de polissage pour le bord de la gencive et l'utilisation sous-gingivale.

Utilisation recommandée :
Elimination du biofilm et des colorations légères

- Ingrédient principal : Glycine
- Sans arôme
 - Goût légèrement sucré
 - Très soluble dans l'eau, ce qui évite toute accumulation même en cas d'usage sous-gingival

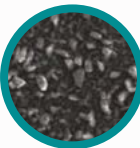






Taille moyenne des particules :
25µm



MODÈLE	RÉFÉRENCE
Poudre Perio Mate 160g bouteille x 2	Y900938

Poudres de prophylaxie

Poudres + Combinaisons de buses & Utilisations

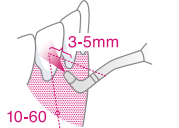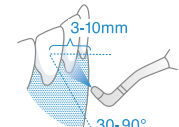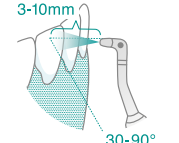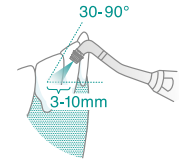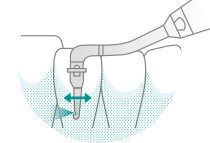MODE	TYPE DE SOINS	PIÈCE À MAIN	BUSE	APPLICATION	POUDRE
MODE PROPHY 	SUPRA-GINGIVAL 		Buse (pour Prophy)		
			Buse (pour Prophy)		
MODE PÉRIO 	SOUS-GINGIVAL 		Buse Jet (pour Péro)		
			Buse (pour Péro)		
			Buse + insert (pour Péro)		

PROTOCOLE MIT*

Minimally Invasive Therapy

Avec le Varios Combi Pro2, Vous pouvez appliquer le protocole MIT de NSK, vous permettant d'exercer au meilleur de vos capacités.

Réalisez les étapes 1, 2 et 4 du protocole MIT grâce au détartreur ultrasonique et à l'aéropolissage par poudre pour des traitements supragingivaux et sous-gingivaux efficaces.



NSK s'engage à assurer une hygiène bucco-dentaire de qualité et à créer des produits dentaires intuitifs et adaptés à un usage quotidien.

Varios Combi Pro2

Pack initial



LUMIÈRE	MODÈLE	RÉFÉRENCE
●	Varios Combi Pro2 Pack initial	Y1500505

- Contenu :**
 - Unité de commande Varios Combi Pro2
 - Pièce à main VA2-LUX-HP Ti
 - Cordon pièce à main VA2-LUX
 - Réservoir Propthy
 - Cordon pièce à main Propthy
 - Pièce à main à poudre (prophylaxie)
 - Pédale de commande sans fil
 - Support
 - Tuyau d'air
 - Tuyau d'eau
 - Cable d'alimentation
 - Kit de bouteilles d'irrigation
 - Kit de bouteilles CLM
 - Inserts ultrasoniques (G8, G16 et P20)
 - Poudre Flash Pearl (300g)
- Spécifications :**
 - Dimensions : L 249 x P 290 x H 115 mm (réservoirs compris)
 - Poids : 3,5 kg
 - Alimentation : CA 220-240 V 50/60 Hz
 - Fréquence : 28-32 kHz
 - Puissance maximale (ultrasons) : 11 W

Options



MODÈLE	RÉFÉRENCE
Propthy Kit pour VCP2	Y1500469

- Contenu :**
- Réservoir Propthy
 - Cordon pièce à main
 - Pièce à main Propthy
 - Poudre Flash Pearl (300g)
- * Inclus dans le pack initial Varios Combi Pro2.



MODÈLE	RÉFÉRENCE
Perio Kit pour VCP2	Y1500470

- Contenu :**
- Réservoir Périó
 - Cordon pièce à main Périó
 - Pièce à main Périó
 - Inserts plastique (40 pièces)
 - Dispositif de retrait pour inserts plastique
 - Poudre Périó Mate (160g)

Options et accessoires

MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE
--------	----------	-----------

iCart Propthy2
Dimensions: H 840 mm
Poids : 16kg



S9098

MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE
--------	----------	-----------

VA2-LUX-HP Ti



EA1203X050

MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE
--------	----------	-----------

B.clean
(Bouteille 1L x 6)

• Solution de nettoyage pour set bouteille CLM



BCL600

Pièces détachées

MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE
--------	----------	-----------

Buse
(pour Propthy)



T1074012

MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE
--------	----------	-----------

Set Réservoir irrigation
(pour kit réservoir d'eau)



ZA16160001

MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE
--------	----------	-----------

Kit réservoir d'eau
Contenu :

- Kit réservoir d'irrigation
- Kit bouteille CLM
- Outil de purge



Y1500719

MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE
--------	----------	-----------

Pièce à Main
(pour Propthy)



T1074001

MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE
--------	----------	-----------

CLM Module Set
Contenu :

- Raccord CLM Périó
- Raccord CLM Propthy



Y1500740

MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE
--------	----------	-----------

Pièce à Main
(pour Périó)



T1077001

MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE
--------	----------	-----------

Buse Jet
(pour Périó)



TA10770106

MODÈLE	PRODUITS	RÉFÉRENCE
--------	----------	-----------

Set bouteille CLM
(pour kit réservoir d'eau)



ZA16240001



NAKANISHI INC. www.nsk-dental.com
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK France S.A.S. www.nsk.fr
14 rue Salneuve, 75017 Paris, France

Sous réserve de modifications techniques.

Create it 